

Technology You Can Trust

AND
A&D Medical

デジタル チェアスケール

AD-6031A ¥265,000(税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

ベッドサイドまで体重計が移動、座ったままで
体重が計れるコンパクトサイズの検定付体重計

病院・老健施設等の入所者の**栄養ケアマネジメント**や**NST(栄養サポートチーム)**活動での
体重測定におすすめの体重計です。



- 高精度 目量 50g/100g切替タイプ
- 温かみのある心地よい木製シートに
滑り止めクッションを装着
- 乗り降りしやすい可倒式の
アームサポート、フットサポート
- 設置、収納場所をとらない
省スペースサイズ



■ アームサポート

サイドからの乗り降りがしやすいよう左右のアームサポートは、アーム回転ノブを外側に引くことで後ろへ倒せます。

アーム回転ノブ



■ フットサポート

移乗する際、乗り降りがしやすいようフットサポートが折りたためます。



■ ロックペダル付きキャスター

測定者を移乗させる際や、体重測定時はロックペダルでキャスターが固定できます。



■ ステアリングプレート

安定した直進走行が保てます。前・後輪付け替えが可能です。(工場オプション:SA938)標準仕様は前輪固定です。



■ 体重値が見やすい大型表示



仕様

品名	チェアスケール	
型名	AD-6031A	
精度等級	3級 (※ご使用地域をご指定ください。)	
承認番号	第D097号	
レンジマーク	レンジ 1	レンジ 2
ひょう量	150kg	200kg
目量	50g	100g
最小測定量	1kg	2kg
最大風袋量	150kg	200kg
最小風袋引量	2.95kg以上	3.0kg以上
最小表示固定	4.05kg以上	4.1kg以上
外形寸法	約560(W)×840(H)×870(D)mm	
質量	約26kg(ACアダプタ、電池を除く)	
電源	専用ACアダプタ AX-TB196、乾電池(単2形4本) 専用充電電池パック AD6031-01 (オプション)	
乾電池寿命	アルカリ乾電池使用時 約150時間	
充電電池寿命	専用充電電池パック使用時 約18時間	
付属品	専用ACアダプタ AX-TB196、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)	
標準価格(税抜)	¥265,000	
商品コード	AD6031A	
JANコード	4981046130837	

オプション

AD-6031専用充電電池パック
AD6031-01
¥16,000 (税抜)
JANコード 4981046712583

専用ACアダプタ
AX-TB196
¥3,000 (税抜)
JANコード 4981046711869



使用地域区分 ご注意の際は、使用地域を指定してください。

使用地域の表記 重力加速度の範囲	区分	使用地域 (都道府県)
9.804~9.807 m/s ²	1	北海道(道北地方、道東地方)
9.803~9.806 m/s ²	2	北海道(道央地方、道南地方、十勝地方)
9.801~9.804 m/s ²	3	青森県、岩手県
9.800~9.803 m/s ²	4	宮城県、秋田県
9.799~9.802 m/s ²	5	宮城県、山形県
9.798~9.801 m/s ²	6	福島県、茨城県、新潟県
9.797~9.800 m/s ²	7	栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
9.796~9.799 m/s ²	8	千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県
9.795~9.798 m/s ²	9	神奈川県、山梨県、長野県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県
9.794~9.797 m/s ²	10	東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
9.791~9.794 m/s ²	11	鹿児島県(薩摩地方を除く)
9.789~9.792 m/s ²	12	沖縄県

※ 複数の区分(重力加速度範囲)に、同じ県名が記載されている場合、どちらの区分でもご使用いただけます。

製造元

タカノ株式会社 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

販売元

AND 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・ティME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6031A-ADJC-01-PR1-15000