

# 医用電子血圧計

# UM-211

MERCURY  
FREE 

「医用電子血圧計 UM-211」は・・・  
病院やクリニックの外来、病棟、介護施設など  
医療現場でのご使用に最適な電子血圧計です。



## 小さなボディに豊富な機能 医療用電子血圧計

### ✓ 高耐久設計

加圧ポンプ、カフは業務利用に適した高耐久タイプを使用しています。

### ✓ 腕の太さに合わせて、カフの交換が可能

成人から幼児まで、幅広い患者の測定に対応。  
標準付属のアダルトカフの他、4種類のサイズに対応しています。



LLカフ



ラージアダルトカフ



アダルトカフ



スモールアダルトカフ



SSカフ

※ 適応腕周は裏面のオプション覧をご確認ください。

### ✓ バッテリー駆動

バッテリー駆動で約300回の測定が可能。ランニングコストが軽減し、  
電池交換の手間が省けます。  
もちろんACアダプタを使用し、充電しながら使用いただけます。

### ✓ 計量・コンパクト

本体重量550gと軽量コンパクトな設計で、持ち運びに便利な大型  
ハンドルや、アクセサリポケット(カフポケット)を装備しています。  
設置床面積12×14cmのコンパクト設計、机の上に  
置いても邪魔にならないサイズです。

### ✓ スタンドタイプに

オプションの血圧計用架台(UM-ST002)に  
装着すれば、外来室等でのご使用や移動しな  
がらの血圧測定に便利です。

血圧計用架台装着時



MERCURY  
FREE 

2013年に国連主導で採択された「水俣条約」は水銀血圧計の段階的な廃止を明記しています。  
「地球にやさしく、人体に安全なMercury-free(脱水銀)社会を一日でも早く実現したい」  
そんな私たちの想いをこのロゴマークに込めました。

# 医用電子血圧計

UM-211



## ✓ 時計表示、室温表示

待機画面では、時計表示のほか、室温表示ができます。

※ 充電中は、室温表示されません。



## ✓ バックライト付 大型液晶ディスプレイ

大型液晶で見やすい!

## ✓ 99回メモリ

測定結果データは99回分本体にメモリされます。



## ✓ IHB機能

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎをお知らせします。



## ✓ 聴診モード搭載

オシロメトリック法による自動測定の外、**聴診モード**を搭載しています。




### 仕様

販売名	医用電子血圧計 UM-211
型名	UM-211
測定方式	自動モード：オシロメトリック法 聴診モード：聴診法
測定範囲	圧力 : 0 mmHg~299 mmHg 最高血圧 : 60 mmHg~279 mmHg 最低血圧 : 40 mmHg~200 mmHg 脈拍 : 40 拍~200 拍/分
測定精度	圧力 : ±3 mmHg 脈拍 : 読み取り数値の±5 %
温度精度	±2.5 °C (+5 °C~+40 °C)
電源	専用バッテリーパック 3.6 V UM-211-20-JC (ニッケル水素充電電池) または専用ACアダプタ AX-TB268-JC
測定回数	電池駆動時 約300回 (圧力値180 mmHg 室温23 °C)
メモリ	99データ
使用環境	+5 °C~+40 °C/10 %RH~85 %RH (結露無きこと) 800 hPa~1060 hPa
輸送/保存環境	-20 °C~+60 °C/10 %RH~95 %RH (結露無きこと) 700 hPa~1060 hPa
本体寸法	約120 (W) × 200 (H) × 140 (D) mm
本体重量	約550 g (専用バッテリーパック除く)
標準付属品	アダルトカフ、専用バッテリーパック (UM-211-20)、ACアダプタ (TB-268)、 ACアダプタケーブル (KO1885)、添付文書、取扱説明書
種別	機械器具18血圧検査または脈波検査用器具
一般的名称	医用電子血圧計
JMDNコード	16173010
認証番号	228AHBZX00008000
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード	4981046701419
商品コード	UM-211C-JCAC
標準価格 (税抜)	¥25,800

※ 本製品はEMC規格 (IEC60601-1-2:2014) に適合しています。  
※ 本製品はJIS T 1115 : 2005に適合しています。

### オプション

品名	適応腕周	商品コード	標準価格 (税抜)	JANコード
LLカフ	41-50 cm	UM-CUF-RS-LL-JC	¥4,000	4981046162081
ラージアダルトカフ	31-45 cm	UM-CUF-RS-LA-JC	¥2,700	4981046162050
アダルトカフ	22-32 cm	UM-CUF-RS-A-JC	¥2,000	4981046159425 ※
スモールアダルトカフ	16-24 cm	UM-CUF-RS-SA-JC	¥2,200	4981046162029
SSカフ	12-17 cm	UM-CUF-RS-SS-JC	¥2,200	4981046162005
専用バッテリーパック		UM-211-20-JC	¥5,000	4981046131650 ※
専用ACアダプタ		AX-TB268-JC	¥5,000	4981046131667 ※
ACアダプタケーブル		AX-KO1885	¥600	4981046712019 ※
血圧計用架台		UM-ST002	¥18,000	4981046149983

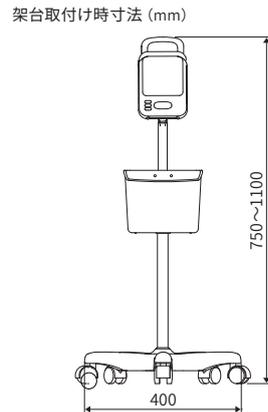

### 定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。  
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

### ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

**0120-707-188**

受付時間：月～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

**AND 株式会社 エー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129  
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815  
製造販売業者：株式会社イー・アンド・デイ 〒364-8585埼玉県北本市朝日1-243

<https://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

\*UM211-ADJC-06-PR4-19604GP