



リストバンド型ライフレコーダー 2
UW-303BLE

取扱説明書・保証書

- この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本書に保証書が含まれています。紛失にご注意ください。

1WMPD404421A

保証書

このたびは、リストバンド型ライフレコーダー 2をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品が、取扱説明書に基づく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、本保証書を現品に添えてご購入の販売店または最寄りの弊社・営業所にご持参いただくか、弊社お客様相談センターにご連絡願います。保証規定に基づき、保証期間内に限り無償で修理・調整いたします。

品名	リストバンド型ライフレコーダー 2		
型名	UW-303BLE		
お客様			
お名前			様
ご住所	□□□□	-	□□□□
ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名(必ず販売店にて記入・捺印していただく)			印
保証期間	ご購入日より1年間		

AND 株式会社 **エーアンドデイ**

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

本書の内容

1 ご使用前に	1-1 使用上の注意 ○一般的な注意事項 ○無線機能について Bluetooth®について
	1-2 確認しよう
	1-3 各部の名前と操作方法
	1-4 本製品の準備
2 ご使用方法	2-1 初期設定をしましょう 初期設定の確認 ペアリング
	2-2 取り付けましょう
	2-3 操作について 表示の切り替え 電池状態を確認する 測定結果の確認 機能 設定 機器情報 通知機能 健康機器からのデータ受信
	2-4 お手入れについて お手入れと保管 廃棄処分するときは
3 お問い合わせ等	3-1 修理を依頼するまえに 故障かな?と思ったら
	3-2 仕様について 製品仕様
	3-3 保証について

1 ご使用前に

1-1 使用上の注意

安全上のご注意<必ずお守りください>

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

	警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*)を負うことが想定されることを示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害(**)を負うことが想定されるか、または物的損害(***)の発生が想定される内容を示します。

*1: 重傷とは失明やケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

図記号の説明

	禁止	禁止(してはならないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中の近くに絵や文章で示します。
	強制	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中の近くに絵や文章で示します。

○一般的な注意事項

- 警告**
分解・改造をしない
守らないと、内蔵リチウム電池の破損により発火の恐れがあります。
- 分解禁止**
- 禁止**
風呂・シャワー室では使用しない
守らないと、漏電により感電や高湿・発火の原因になります。
- 強制**
万一、本製品を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する
守らないと、体調不良の原因になります。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーを使用している場合は専門の医師に相談する**
(自宅療養などにより医療機関の外で、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器以外の医療電気機器を使用される場合)
守らないと、電波により医療電気機器の動作に影響を与える場合があります。

△注意

- 禁止**
本製品を取りつけたまま入浴やプール等に入らない
守らないと、故障の原因になります。
- 石鹸、洗剤、ハンドクリーム等油分を含む液体などがからないようにする**
守らないと、故障の原因になります。
- ズボンのポケットに入れて使用しない**
守らないと、ケガ・故障の原因になります。
- 衝撃を加えたり、落下させない**
守らないと、故障の原因になります。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しない(環境により電波が届かない場合があります。)**
守らないと、事故・故障の原因になります。
- 汗や水滴が付着したらすみやかに拭き取る**
守らないと、事故・故障の原因になります。
- 製品の異常を感じた時は、すぐに使用を中止し、点検・修理を依頼する**
守らないと、事故・故障の原因になります。
- この取扱説明書をよく読み、理解してから使用する**
守らないと、事故・故障の原因になります。
- 新生児または小児の手の届かないところに保管する**
守らないと、誤飲・ケガの原因になります。

○無線機能について

△警告

- 航空機や病院など、使用を禁止された区域では、使用しない**
電子機器や医療機器に影響をおよぼす場合があります。自宅療養など、医療機関以外で埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を使用する場合は、電波の影響について個別に医療機器メーカーなどに確認してください。

△注意

- 本製品には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。そのため、本設備の無線機能を使用するときに無線局の免許が必要ありません。なお、日本国内でのみ使用できます。**
- 本設備は工事設計認証を取得していますので、本設備を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。**
- 2.4GHz 付近の電波を通信している無線装置などの近くで本設備を使用した通信をすると、双方の処理速度が落ちる場合があります。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。(環境により電波が届かない場合があります。)**

Bluetooth®について

万一、本製品から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに使用を停止してください。

●良好な通信のために

- 通信相手とは見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能場合があります。
- Bluetooth®接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発生する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境では使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。この場合、使用していない機器の電源を切るか、使用場所を変更してください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth®対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

<本製品のBluetooth®の通信について>

- 本製品は、Bluetooth®無線機能を有し、以下の機器と接続できます。
- Bluetooth® low energyに対応した受信機器
各機器は、データを受信するためにアプリケーションが必要です。接続方法は、各機器のアプリケーションの取扱説明書を参照してください。


Bluetooth® Bluetooth®機器は、Bluetooth®のロゴマークが記載されています。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。その他の商標およびトレードネームは、それぞれ所有者に帰属します。

1-2 確認しよう


最初に、次のものがそろっているか確認してください。万一、不足のものがありましたら、お客様相談センター(裏面のお問い合わせ先参照)までご連絡ください。

ライフレコーダー 2本体

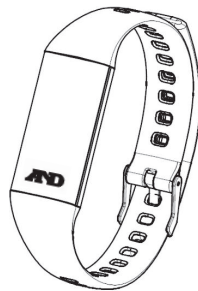


専用充電器

取扱説明書・保証書

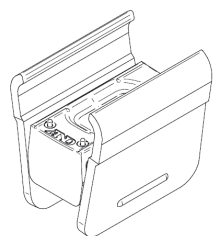


1-3 各部の名前と操作方法

— 各部の名前 —

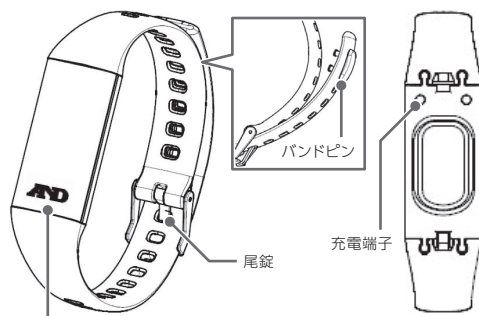

— 操作方法 —

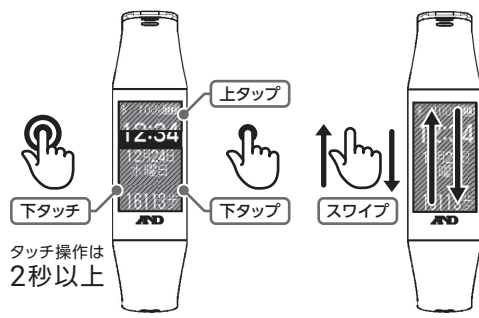

1-4 本製品の準備


起動を確認する

お知らせ

- 工場出荷時は電源がOFFになっています。
- 時刻設定がされておりません。

本製品に専用充電器を接続し、USB端子をPC等のUSB接続口に差し込み、充電します。

起動後、充電表示となります。

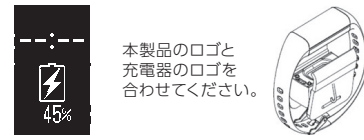

充電をする

専用充電器を接続します。

充電が始まり、充電中表示となります。

※充電が開始されると本体が振動します。



※充電完了表示になったら専用充電器を取り外してください。

※充電が完了すると、本体が振動します。

※USB規格に準拠したアダプタを使用してください。

2 ご使用方法

2-1 初期設定をしましょう

初期設定の確認

はじめて使うときは、初期設定を行う必要があります。初期設定の手順については、受信機器側を参照してください。

お知らせ


- 本製品の初期設定には専用のアプリケーションと受信機器が必要です。
- 初期設定を行うと本体画面に時計情報・日付・歩数が表示されます。
- 接続可能な健康機器に関する情報は、お問い合わせ先をご覧ください。
- 本製品を手首に装着して生活リズム(日中の運動や夜間の睡眠時間など)を計測することができます。また、弊社製Bluetooth®搭載体重計や血圧計と無線連動し、記録等が可能です。

ペアリング

Bluetooth®機器は特定の接続相手と通信するためにペアリングが必要です。最初にペアリングを行うと、本製品の測定データは、自動的にペアリングをした受信機器に送られます。本製品とBluetooth®搭載の受信機器とのペアリングは、以下の手順を参照してください。

また、受信機器のペアリングの説明書も参照してください。ペアリングウィザードが、準備されている場合は、そちらをお使いください。

1 画面非表示状態で[下タッチ]をし、表示された設定画面から[1スワイプ]操作で接続画面を表示させ、[下タッチ]操作をします。

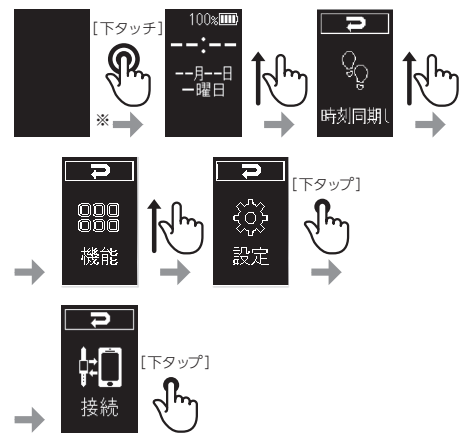

※時計を見る動作を行うことでも画面が表示されます。

2 Bluetooth®アドレスが点滅表示になったら、受信機器の説明書に従い接続します。

※ペアリングを行う受信機器に本体を近づけてください。



※ペアリングに失敗した場合は、もう一度1の手順からやり直してください。

お知らせ

- ペアリング時の注意事項
- ペアリングを行う際は、ほかのBluetooth®機器の電源をOFFにしてください。複数の機器のペアリングは同時にはできません。
- 本製品は5台の対応受信機器とのペアリング情報を記憶して、通信することが可能です。
- 測定データの受信ができなくなった場合は、再度ペアリングを試みてください。受信機器によっては、設定などでペアリングを解除した後にペアリングを行ってください。新たに6台目とペアリングする場合は、最も接続時刻の古いペアリングが解除され、新たにペアリングされます。

●測定とデータ送信

ペアリング後の通信は、自動的に行われます。受信機器は通信可能状態にしておいてください。

お知らせ

- 測定時の注意事項
本製品と受信機器との通信距離は、約10mです。この距離は周囲の環境によって短くなりますので、測定後データが届く距離を確認してください。

2-2 取り付けましょう

本製品の取り付け

- 左手首に装着する場合の手順です。
- 左手首に装着することができない場合は、右手首に装着してください。
- 睡眠中の状態が測定できるため、できるだけ就寝時にも装着してください。


1 尾錠を上にしてリストバンドを手首に装着します。



※装着位置について
手首の骨から指1本程度
肘側の位置に装着してください。

2 尾錠に通したベルトの端は、バンドピンで止めてください。

※装着具合について
ベルトと皮膚の間に人差し指が1本入る程度の穴位置を選択してください。

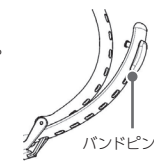

2-3 操作について

表示の切り替え



電池状態を確認する

液晶表示部の電池残量または電池消耗マークを目安に充電をしてください。

受信機器と接続中は通信中マークが点灯します。




お知らせ

- 電池残量が20%を下回ると、本体が振動しお知らせします。速やかに充電をしてください。
- 電池残量が10%を下回ると、本体が振動後、充電アラート表示となります。測定データの記録が停止されますので、直ちに充電してください。
- 電池残量が5%を下回ると、表示が点灯しなくなり、時計だけが動作するスリープモードへ遷移します。直ちに充電をしてください。
- ※電池が完全に消耗すると時計情報がなくなります。充電後、受信機器と接続し、初期設定を行ってください。

測定結果の確認


アイコンと測定結果が以下の順番で自動的に表示されていきます。

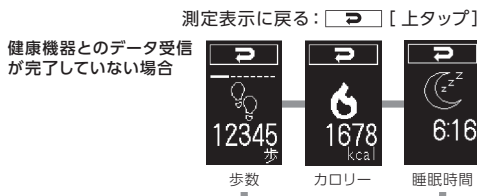

健康機器とのデータ受信が完了していない場合



健康機器とのデータ受信が完了している場合

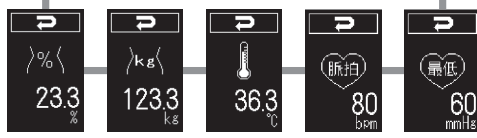


※データ受信していない健康機器のアイコンと測定結果は表示されません。

※初期設定されていない場合、測定値は表示されません。

[下タップ]操作をすると、その時表示されているアイコンの測定結果が一定時間表示されます。その状態で[スワイプ]操作をすると、他の測定結果表示画面に遷移します。

例：健康機器のデータを受信しておらず、歩数アイコンが表示されているときに[下タップ]操作を行った場合

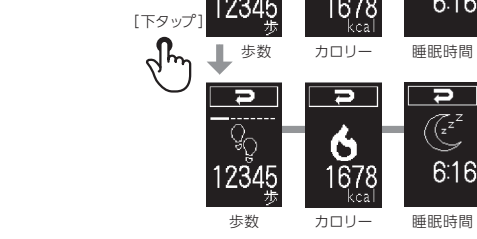

機能

タイマー機能


1 機能画面で[下タップ]操作をしてタイマー画面を表示させ、[下タップ]操作をします。



2 [下タップ]操作でカウントダウンが開始されます。※設定した時間が経過すると、本体が振動してお知らせします。



設定時間を変更する方法

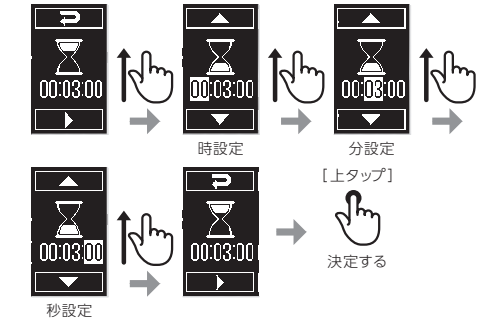

ストップウォッチ機能

1 機能画面で[下タップ]操作をし、[↑スワイプ]操作でストップウォッチ画面を表示させます。



2 ストップウォッチ画面で[下タップ]操作をします。計測を開始/停止させることができます。




探索機能

1 機能画面で[下タップ]操作をし、[↑スワイプ]操作で探索画面を表示させます。



2 探索画面で[下タップ]操作をします。探索が開始されます。

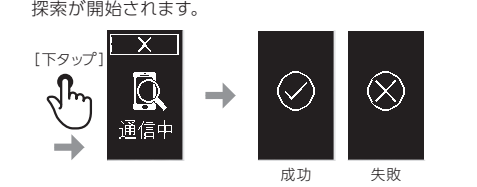


※探索機能とは、本製品から受信機器を探す機能です。※受信機器側のアプリケーション仕様によっては動作しないことがあります。


設定

設定表示に戻る：[下タップ] [上タップ]

1 設定画面で[下タップ]操作をします。各項目は15秒で自動的にOFFとなります。

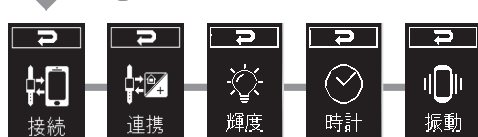


2 [スワイプ]操作で項目を切り替えます。

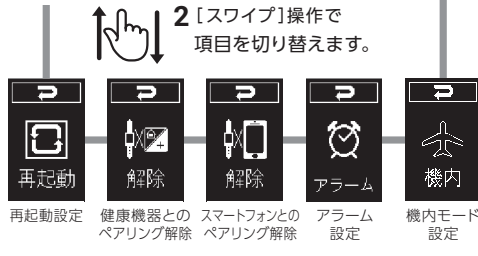

健康機器とのペアリング

1 連携画面で[下タップ]操作をします。

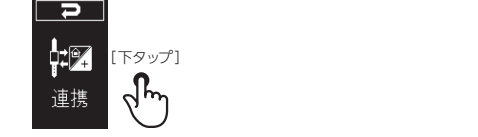

2 健康機器側の取扱説明書に従い健康機器をペアリングモードにしてください。

ペアリングが完了すると、健康機器のアイコンとBluetooth®アドレスが表示されます。

※ペアリングを行う健康機器に近づけてください。

※ペアリングに失敗した場合は、もう一度やり直してください。




輝度設定

1 輝度調整画面で[下タップ]操作をします。



2 [下タップ]操作で、お好みの輝度に調整し、[上タップ]操作で決定します。

※輝度を明るく設定すると、電池の減りが早くなる可能性があります。

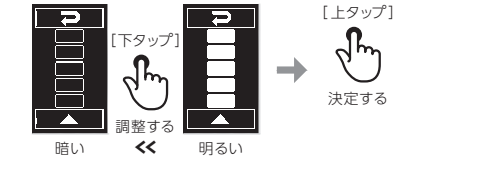

時計表示設定

時計設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作で時計表示を選択し、[上タップ]操作で決定します。



振動設定

振動設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作で振動のON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。



※振動設定をOFFにすると、すべての振動通知機能がOFFとなります。

機内モード設定

機内モード設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作で機内モードのON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。



アラーム設定


アラーム設定画面で[下タップ]操作をし、[下タップ]操作でアラームのON/OFFを選択し、[上タップ]操作で決定します。



※アラーム時間の変更は、受信機器から行ってください。(本体で時間の変更はできません)
※アラーム設定をOFFにすると、各曜日すべてのアラームがOFFとなります(各曜日でON/OFF設定を行いたい場合は、受信機器から設定を行ってください)


スマートフォンとのペアリング解除

スマートフォンとのペアリング解除画面で[下タップ]操作をし、スワイプ実行画面で[上スワイプ]操作で決定します。ペアリング解除が完了すると時計画面が表示されます。

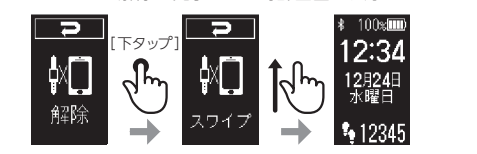

健康機器とのペアリング解除

健康機器とのペアリング解除画面で[下タップ]操作をし、スワイプ実行画面で[上スワイプ]操作で決定します。ペアリング解除が完了すると時計画面が表示されます。

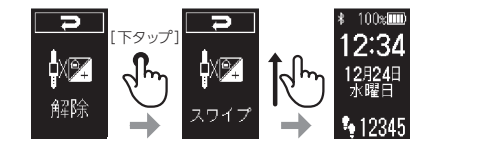

再起動設定


再起動設定画面で[下タップ]操作をし、スワイプ実行画面で[上スワイプ]操作で決定します。再起動が完了すると時計画面が表示されます。



機器情報

情報表示に戻る：[下タップ] [上タップ]

情報画面で[下タップ]操作をします。各項目は15秒で自動的にOFFとなります。

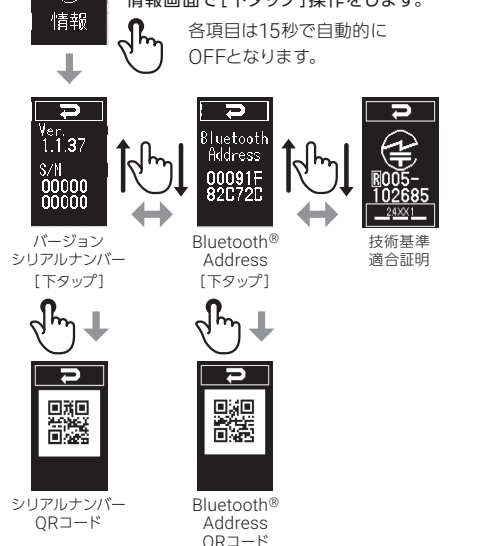

通知機能

SNS通知

受信機器から通知があったときに振動と表示でお知らせします。




着信通知

受信機器から通知があったときに振動と表示でお知らせします。



アラーム通知

設定した時間になると、振動と表示でお知らせします。[上タップ]でスヌーズを解除します。[下タップ]で振動を止め、スヌーズ機能となります。

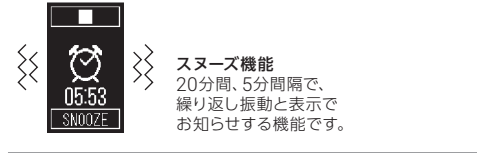

ウォーク通知

受信機器から設定した時間の範囲で歩行が検知されなかった時に、振動と表示でお知らせします。




目標歩数達成通知

受信機器から設定した目標歩数を達成したときに、振動と表示でお知らせします。



電池残量通知

電池残量が20%を下回った時に、振動と表示でお知らせします。速やかに充電を行ってください。

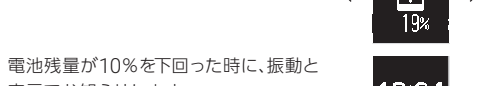

電池残量が10%を下回った時に、振動と表示でお知らせします。測定結果の保存が停止されますので、直ちに充電を行ってください。



健康機器からのデータ受信


時計表示で[↓スワイプ]操作をします。

※接続中表示となり、健康機器の検索を開始します。

- ① 健康機器とペアリングが完了していない場合
- ② 電池残量が10%未満の場合
- ③ 機内モード設定がONの場合




健康機器と接続が成功すると、接続した健康機器のアイコンが表示されます。

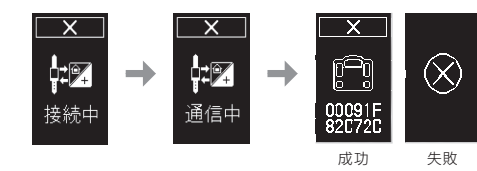

※失敗した場合は、もう一度やり直してください。

測定データの受信が完了すると、測定値が表示されます。

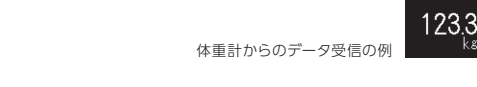

2-4 お手入れについて

お手入れと保管

ライフレコーダーが汚れたときは、水や中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってから拭いてください。その後、乾いたやわらかい布で、から拭きをしてください。

【注意】

- ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- 水をかけたり、丸洗いをしたりしないでください。
- 高温・多湿・直射日光、ホコリの多い場所は避けてください。
- 長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、ケースなどに収納して保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄処分するとき

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になりました本体は家庭ゴミとして捨てず、各自自治体の定めるリサイクル回収拠点へお持ちください。または、「本製品に対するお問い合わせ先」まで、ご相談ください。本体の分解はしないでください。



3 お問い合わせ等

3-1 修理を依頼する前に

故障かな?と思ったら

こんなとき	ここを確認	対処のしかた
[下タップ]操作しても表示されない	電池が完全に消耗していませんか?	充電をしてください(おもて面をご覧ください)
受信機器へデータが送信されない	-	受信機器とペアリングを再度確認してください
健康機器のデータが受信できない	-	健康機器とペアリングを再度確認してください
⚠が表示された	-	お問い合わせ先へのご連絡の上、ご相談ください

※問題が解決しないときには、お問い合わせ先へのご連絡の上、ご相談ください。

3-2 仕様について

製品仕様

販売名	リストバンド型ライフレコーダー 2
型名	UW-303BLE
表示	時計：0:00～23:59(1分単位) 歩数：0～99999歩(1歩単位)*1 消費カロリー：0～9999kcal(1kcal単位)*1 睡眠時間：0:00～23:59(1分単位)*2 血圧/脈拍/体温/体重/体脂肪は接続した健康機器の仕様による
通信	Bluetooth® Ver.4.2 Low Energy
電源	リチウムイオン電池(JHY31223HV) DC3.8V 75mAh
充電方式	専用充電器による充電
充電時間	約100分
連続動作時間	約10日 ※ご利用状況により変動します
メモリ	1分サマリデータ26日分
外形寸法	16.2mm(W)×22.7mm(L)×11.3mm(H)
動作湿度	0～40℃ 15～85%
保存湿度	-15～60℃ 10～95%
防水	IP57 / IP55
付属品	専用充電器、取扱説明書・保証書

*1 歩数、消費カロリーは0:00にリセットされます。

*2 睡眠時間は12:00にリセットされます。

※お断りな仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

3-3 保証について

保証規定

- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- 1. 誤ったご使用またはお取り扱いによる故障または損傷
- 2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰せられる故障または損傷
- 3. 不適切な修理・改造および分解、その他のお手入れによる故障または損傷
- 4. 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷
- 5. ご使用後の外表面の傷、破損、劣化、外装部品、付属品の交換

※ご購入店または弊社営業所にご持参いただく際の諸費用は、お客様がご負担願います。

本製品に対するお問い合わせは下記のお問い合わせフォームへご入力の上、送信をお願いいたします。
<https://www.aandd.co.jp/support/>

