

ワンタッチ取付金具R 取扱説明書

商品コード：TM-STA008

このたびは、弊社商品をお買い求めいただき誠に有り難うございます。本書は、使用方法ならびに注意事項について記述したものです。安全にご使用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

1. 取り扱い上の注意

正しくお使いいただくために、下記注意事項および使用方法をよくお読みください。

⚠注意	
❗	<ul style="list-style-type: none"> ワンタッチ取付け金具Rを専用架台（TM-ST100B/TM-ST100A）に固定してください。使用前に金具が確実に固定ネジで専用架台に固定されていることを確認してください。取り付けガタ、緩みがあると使用中に製品が落下して事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> 使用上の注意 ME機器製品（TM-2591）が、ワンタッチ取付金具Rで確実にロック（固定）されていることを確認してください。使用中に製品が落下して事故の原因になります。
⊘	<ul style="list-style-type: none"> 流用の禁止 本製品は、弊社製ME機器製品（TM-2591）の専用金具です。指定機器以外に使用しないでください。事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> 改造禁止 本ワンタッチ取付金具Rを改造したり他の用途に使用しないでください。事故の原因になります。

2. 概要及び使用目的

ワンタッチ取付金具R（TM-STA008）は、専用架台（TM-ST100B/TM-ST100A）に取り付け、弊社製ME機器製品（TM-2591）を容易に架台から取り外しまたは取り付けを可能にするための専用金具です。


3. 部品構成

本製品は、下記の部品で構成されます。ご使用前に付属品がそろっていることおよび本体と各付属品に損傷がないことを確認してください。万一、内容物に不足等ございましたらお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。


・ 本体	TM-STA008（ワンタッチ取付金具R）	1 台	・ ワンタッチ取り付けアダプタ 1	1 個
・ 付属品	固定用ネジ（M3×6）	4 本	・ 安定台	1 個
・ 取扱説明書（本書）		1 冊	・ 取り付けネジ（M4×12）	4 本

固定用ネジ（M3×6）



取り付けネジ（M4×12）

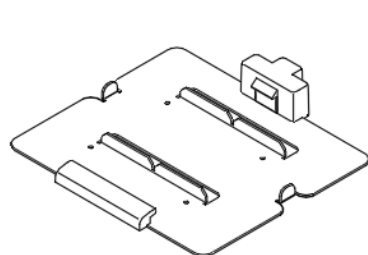

TM-STA008(ワンタッチ取付金具R)

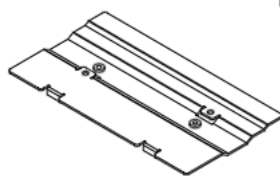

ワンタッチ取付アダプタ 1

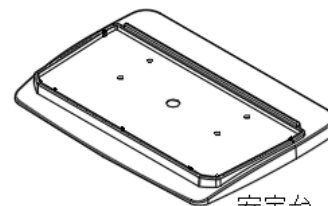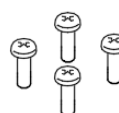

安定台


4. 組み立て方法

1. 機器本体の準備

ME機器本体（TM-2591 シリーズ）は、TM-STA008 に付属しているワンタッチ取り付けアダプタ 1 と安定台が取り付けられているか確認してください。取り付けられていない場合は、下記手順でTM-2591 にワンタッチ取り付けアダプタ 1 と安定台を取り付けてください。

取り付け手順：

- ① ME機器本体（TM-2591）機器本体の底面に
取り付けネジ M4×12（2 本）でワンタッチ取り付けアダプタ 1
を取り付けます。
- ② 次に取り付けネジ M4×12（2 本）で安定台を取り付けます。

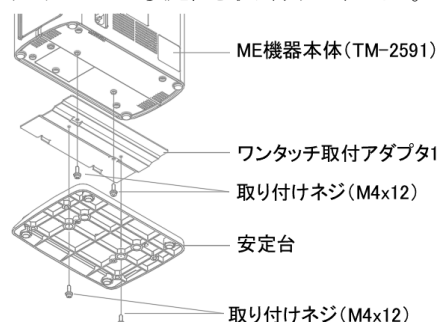


2. ワンタッチ取付金具Rの専用架台への取付

専用架台 (TM-ST100B) にワンタッチ取付金具R (TM-STA008) を下記の手順で取り付けてください。

取り付け手順：

- ① 架台の天面に付いている組み立て用ツマミネジ (2箇所) を架台から取り外してください。(ネジ部を上から押さえながらツマミ部を下側に引っ張るとプラスチックワッシャが外れます)
- ② ワンタッチ取付金具R (TM-STA008) を、専用架台 (TM-ST100B) に固定用ネジ (ワンタッチ取付金具Rの付属品) M3×6 (4本) で固定してください。

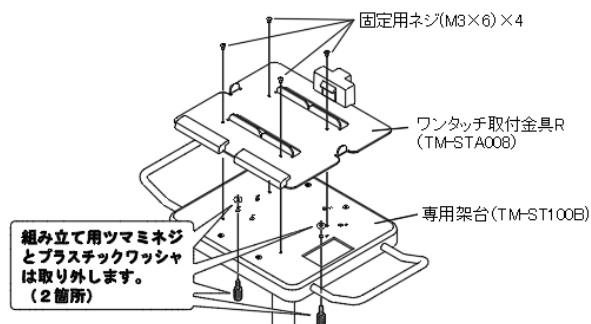


お知らせ

- 専用架台 (TM-ST100B) で、ワンタッチ取付金具R (TM-STA008) をご使用の場合、専用架台の天面に取り付けられている組み立て用ツマミネジ (2箇所) は取り外して、ワンタッチ取付金具Rを付属の固定用ネジ [M3×6 (4本)] を使用して、架台に確実に取り付けください。

5. 使用方法


1. ME機器本体 (TM-2591) を装着する場合：

- ① ME機器本体の (A) 下側安定台を、最初にワンタッチ金具Rの前面側の (B) 固定部に差し込みます。
- ② ME機器本体の後面が、(C) ロック部にロック (固定) するように設置します。
- ③ 後部の (C) ロック部が、確実にロックされていることを確認してください。

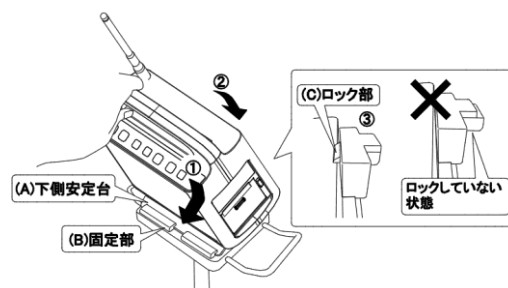

2. ME機器本体 (TM-2591) を取り外す場合：

- ① ワンタッチ金具Rの (D) ロックレバーを引きます。
- ② ME機器本体の取っ手を前面に傾けながら後面の (C) ロック部を外します。
- ③ 後面のロックが外れたら、ME機器本体の取っ手を持って持ち上げてください。

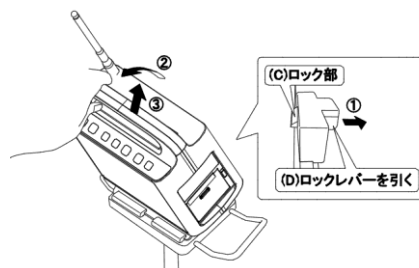

お手入れ・点検の方法

- ・清掃するとき、または血液、薬剤、汚物などが付着した場合は、水にうすめた中性洗剤を含ませた布、スポンジで汚れを拭き取った後、乾いた布で乾拭きしてください。
- ・塩素系洗剤、シンナ、ベンジン、クレゾール等を使用しないでください。

7. 仕様

材質	本体	ステンレス製
	樹脂部	POM
寸法	：	186(W)×186 [ロック部含む] (D)×25(H) mm
質量	：	370g

8. サービスについて

- ・使用方法、故障などご不明な点はME機器相談センターへお問い合わせください。
- ・本書に記載の意匠、仕様及び部品の性能向上のため、一部予告無く変更することがあります。

製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ
住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

医療機器に関するご質問・ご相談・修理品 窓口

受付時間：月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) AM9:00～PM5:00

AND エー・アンド・デイ ME 機器相談センター ☎ 0120-707-188

修理品の発送先 〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町9-1 9
株式会社エー・アンド・デイ ME事業本部 FE課
TEL. 0572-21-6644