

ABPM用解析ソフト TM-2487 / 携帯型自動血圧計 TM-2441 よくあるご質問関連資料

TM2441-JC 通信モードへの変更ならびに接続について

Q) 血圧計と通信できません。USB通信ができません。

A) 通信ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

TM2441-JC と接続する場合、血圧計を通信モード（※1）に変更してから通信をしてください。

接続向きを誤りますとコネクタ部が故障しますのでご注意ください。（※2）

※1 TM2441-JCを通信モードにする方法

TM2441-JCの一部製品を通信モードへ変更するには操作が必要です。

通信モードへの変更が必要なTM2441-JCの対象シリアル番号範囲：2A6900101～2A6900610

TM2441-JCは後継機種TM-2441L-JC16と外観が異なります。



TM2441-JC



TM-2441L-JC16

変更手順

1. AUTOスイッチを「OFF」にします。
2. 表示が消灯中なら「START/STOP」または、「EVENT」スイッチを押し、待機中の表示に戻します。
3. LCD画面が表示している間に、「EVENT」スイッチを押し続けると、ピッと鳴り、通信待機状態の表示になります。

※2 コネクタの接続向きについて

ツメがある方が下側にくるように接続してください。

